



---

## MASCARILLA FFP2 NR CE 2163 BLANCA

Ref. LIM008484

### 1) Denominación y descripción del producto.

Mascarilla autofiltrante, actúa como filtro del aire procedente del entorno hacia dentro y contienen entre sus tejidos 5 capas de alta eficacia para la filtración. Su finalidad es proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes ambientales (en partículas o aerosoles) tales como agentes patógenos, agentes químicos, etc.

Sin válvula.

Desechable de larga durabilidad.

Gomas a los laterales.

Clip nasal.

Protege nariz, boca y barbilla.

Color: Blanco.

Composición: Tejido no tejido "melt blown"

Medidas: 12,5x23cm

Lugar de procedencia: China

### 2) Especificaciones técnicas, certificaciones y tipo de protección.

Cumple Normativa **EN149:2001 + A1:2009**

Los elementos probados de las muestras analizadas **cumplen con los requisitos de FFP2**

**EPI Categoría III**, de acuerdo a la regulación europea **(EU)2016/425, anexo 9.**

**Certificado CE no: 2163-PPE-1624**

### 3) Instrucciones para la eliminación de la mascarilla.

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

### 4) Presentación.

20 estuches de 50 unidades

Caja 1.000 unidades

Fecha de edición: Febrero 2021

## 5) Instrucciones de uso sobre colocación, uso y mantenimiento, manipulación.

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación.

### Uso personal.

#### 5.1.- Colocación de la mascarilla

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar las gomas por detrás de las orejas.
5. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla
6. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
7. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
8. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



**Figura 2 - Instrucciones de colocación de la mascarilla higiénica**

#### 5.2.- Retirada de la mascarilla

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección;
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico como se describe en el apartado 3
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Fecha de edición: Febrero 2021